

## Atemtrainer

### EzPAP Atemwegs – Überdrucktherapiesystem



#### Behandlung und Vorbeugung von Atelektasen

- Verwendung ausschließlich an einem Patienten
- Das System ist täglich zu verwerfen, wenn der Patient mit multiresistenten Erregern in den Atemwegen besiedelt/infiziert ist.
- Verwendungsdauer ansonsten nicht eingeschränkt
- Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Von außen mit warmen Seifenwasser säubern, im Anschluss an der Luft trocknen bis alle Flüssigkeitstropfen verdunstet sind.

### Volumetrieübungsgerät Mediflo Duo Atemtrainer mit PEP



#### Atemtrainingsgerät

- Nutzbar für die Einatmungs- und Ausatmungstherapie
- Verwendung ausschließlich an einem Patienten
- Das System ist täglich zu verwerfen, wenn der Patient mit multiresistenten Erregern in den Atemwegen besiedelt/infiziert ist.
- Verwendungsdauer ansonsten nicht eingeschränkt
- Nach jeder Anwendung ist das Mundstück auszuspülen
- Danach mit Einwegpapiertuch trocken tupfen.

### GeloMuc Atemtherapiegerät



#### Öffnen der Atemwege und Lösen von Bronchialschleim

- Verwendung ausschließlich an einem Patienten
- Aufbereitung des Gerätes erfolgt täglich über die AEMP
- Verwendungsdauer ansonsten nicht eingeschränkt